

1 Avant de commencer

- Prélevez l'échantillon le plus tôt possible après l'apparition des symptômes.
- Étiquetez le contenant de **l'échantillon avec le nom complet du patient, la date de prélèvement et un identificateur unique** (p. ex., date de naissance ou numéro de carte Santé).
 - Remarque : Le défaut de fournir ces renseignements peut entraîner le rejet ou le retard des tests
- **Remplissez tous les champs** de la demande d'analyse appropriée.

Entreposage des troussees inutilisées

- Les troussees peuvent être conservées à température ambiante.
- Un entreposage inadéquat entraînera une perte d'efficacité.
- Les troussees ne doivent être entreposées que jusqu'à leur date d'expiration.



Pour accéder à des directives détaillées, scannez le code QR.

À l'usage du laboratoire de SPO seulement

Numéro de la trousse de SPO : 390075

Date de préparation :

Date d'expiration :

Numéro de lot :

2

Instructions de collecte

1. Retirez le bouchon du flacon de manière aseptique et insérez l'échantillon dans le milieu de transport. Remplacez et serrez le capuchon.
2. Placez le contenant dans le sac à biorisques et scellez le sac.
3. Insérez la demande dûment remplie dans la pochette située à l'extérieur du sac de sécurité biologique scellé.
4. Lavez vos mains et confirmez les instructions de traitement en laboratoire.
5. Pour maintenir une viabilité optimale, l'échantillon doit être entreposé et transporté à une température de 2 à 8 °C ou sur de la glace. Transportez au laboratoire pour traitement dans les 48 heures suivant le prélèvement.



Pour accéder à des directives détaillées, scannez le code QR.