

Ressource pour les travailleurs de la santé

Nettoyage et désinfection des protections oculaires réutilisables



1
Se laver les mains et mettre des gants.



2
Essuyer d'abord l'intérieur de la protection oculaire et ensuite sa surface extérieure.




3
Veiller à ce que toutes les surfaces restent humides durant la période de contact du désinfectant (c. à d. pendant 1 à 3 minutes).



4
Rincer à l'eau du robinet et laisser sécher*.



5
Retirer les gants et se laver les mains.

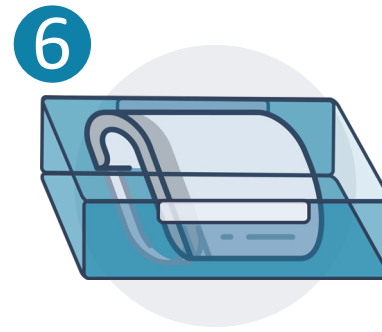

6
Ranger la protection oculaire dans une aire désignée propre.

Rappels importants

- Les protections oculaires réutilisables peuvent comprendre les écrans faciaux et les lunettes de protection ou de sécurité.
- Suivre les meilleures pratiques de prévention et de contrôle des infections pour l'utilisation d'une protection oculaire au point de service ou lors d'une évaluation des risques personnels.
- Nettoyer et désinfecter la protection oculaire réutilisable avant et après chaque utilisation en suivant les consignes du fabricant ou celles figurant sur le produit.
- Les protections oculaires à usage unique telles que les écrans faciaux, les visières ou les masques doivent être jetées de façon sécuritaire après une seule utilisation.
- Si l'équipement est endommagé ou que la pièce en mousse de l'écran facial ou la sangle des lunettes est visiblement souillée, NE PAS LES RÉUTILISER.

* Astuce : Pour aider à réduire la formation de buée, après la désinfection, nettoyer avec du savon et de l'eau ou avec de l'alcool.

Pour en savoir davantage sur SPO, visiter santepubliqueontario.ca. © Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2021